

## DUSCHBORD STÖDBEN TILL DUSCHBORD

Artikelnummer: **141000, 141050, 141060,**  
**141065, 141070, 141080**

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Duschbordet skall endast användas för att duscha liggande personer.
- Duschbordet skall monteras i väggen ovanför ett badkar alternativt en golvbrunn.
- Installationen skall göras av behörig fackman detta då det är av yttersta vikt att bordet sitter stadigt i väggen.
- Produkten levereras utan ben, varför den måste kompletteras med ben för att stödja mot badkar eller golv.
- Innan användning kontrollera att stödbenen vilar stadigt mot badkarskant/golv innan brukaren lägger sig på bordet.
- Används stödben mot golv kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan ge skador på golv samt göra bordet instabilt.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Kontrollera regelbundet att clipsen som håller bordet i uppfällt läge mot väggen inte är utslitna.
- Max brukarvikt 100 kg.

**Avsedd användning:** Swerecos Dusch- och skötbord används för att underlätta vid tvagning.

### Teknisk specifikation

Art nr: 141000	Art nr: 141050	Art nr: 141060	Art nr: 141065	Art nr: 141070	Art nr: 141080
Duschbord 140 cm, exklusive ben	Duschbord 157 cm, exklusive ben	Duschbord Specialmått, exklusive ben	Stöben i specialmått, par	Stödben mot badkar, par	Stödben Mot golv, par
Bredd: 60 cm Längd: 140 cm	Bredd: 60 cm Längd: 157 cm	Max bredd: 70 cm	Längd: utifrån önskade specialmått	Benlängd, beräknad från badkarskant: 40 cm	Benlängd/ Arbets höjd, beräknad från golv: ca 92 cm
Arbets höjd: 92 cm	Arbets höjd: 92 cm			Arbets höjd: ca 92 cm	Vikt: 1,3 kg
Vikt: 5,5 kg	Vikt: 6,0 kg			Vikt: 0,7 kg	

Material: Tvättbart nylontyg (klädsel), (stativ)

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 100 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Visuell kontroll



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)10 330 23 10


Fax: +46 (0)8 754 30 80

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Montera fast stativet i väggen, 92 cm ovanför golvet/ 40 cm ovanför badkarskant, 7,5 cm från väggytan, se bild. Detta skall göras av behörig fackman. (Håldiameter 9mm, avstånd mellan hål 75 mm)
2. Montera fast benen till stativet, 40 cm från mitten på vardera sida, se bild.
3. Spänn fast duken i stativet så som bilden visar.
4. Efter montering kan bordet fällas upp mot väggen med hjälp av clips och tar därigenom liten plats då det ej används.
5. Vid användning, fäll ned stödbenen mot badkarskanten/golvet och kontrollera att bordet står stadigt före användning.
6. Används stödben som går mot golvet kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

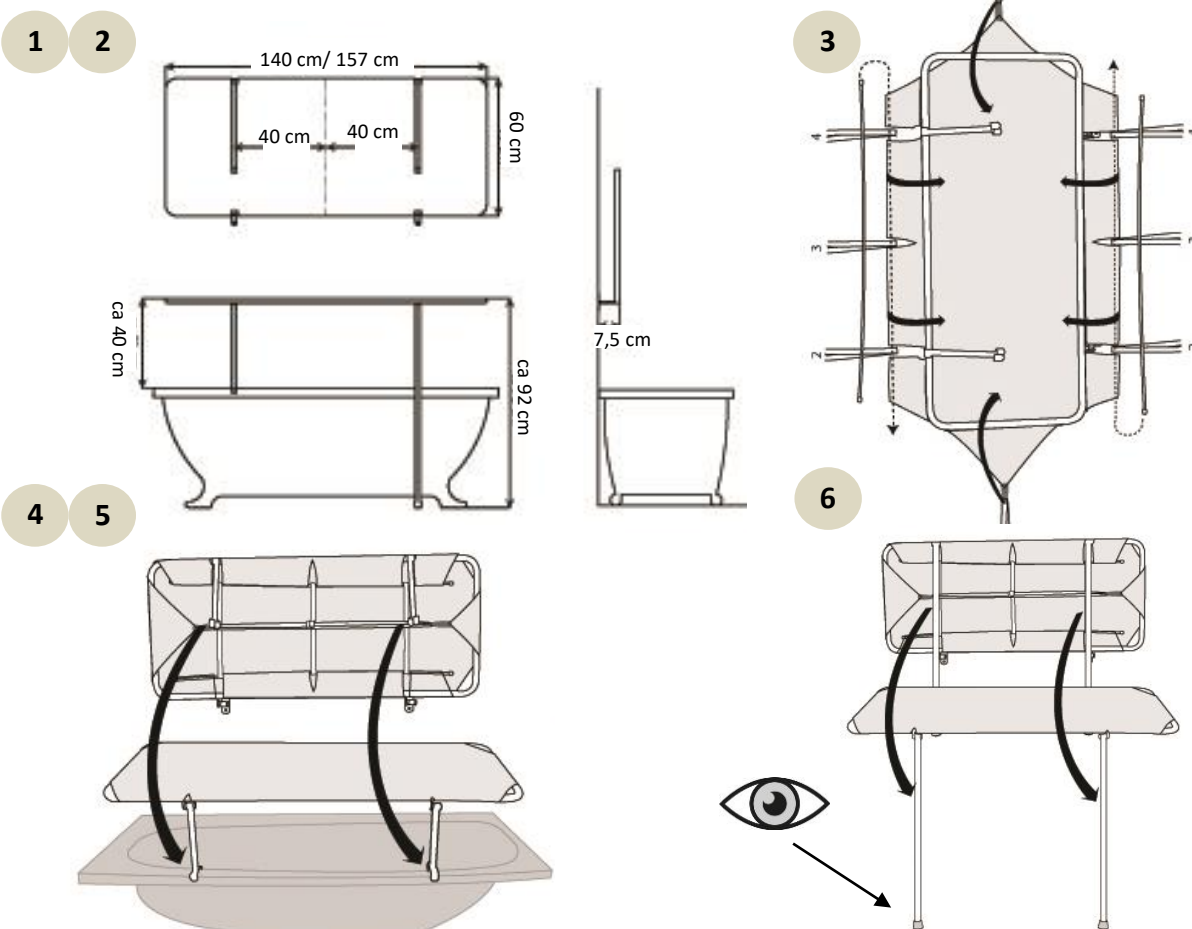

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

## Reservdelar:

Art. nr: 120706, Stödfot  
 Art. nr: 14100008, Plastbusning  
 Art. nr: 14100009, Bult M6x14  
 Art. nr: 14100010, Bricka 6x22  
 Art. nr: 14100011, Fjäderklämma

Art. nr: 14100016, Kort band L=1000 (3st)  
 Art. nr: 14100017, Långt band L= 2750 (1st)  
 Art. nr: 14100013-S, Rör till dushtyg 1200mm  
 Art. nr: 14100025-S, Väggfästen par