

GÅBOCK KVADRANT BARN

Artikelnummer: 121165

Avsedd användning: Gåbock kvadrant är avsedd att använda som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Leveranskontroll: Kontrollera att doppskor finns monterade på alla ben. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Gåbocken bör endast brukas på plant underlag. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Produkten ska justeras in av kompetent personal (t. ex. arbetsterapeut, sjukgymnast) för att passa respektive brukares särskilda behov.
- Vid användning ska gåbockens ben vara riktade bort från brukaren. Detta justeras genom att vrida handtaget 180 grader.
- Före användning - Kontrollera att clipset sitter ordentligt intryckt.
- Kontrollera doppskorna regelbundet. Ta bort föremål som fastnar under doppskon. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut.
- Vid tecken på att höjdstjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt: 50 kg




Teknisk specifikation

Ställbar höjd: 48,5 - 58,5 cm
Vikt: 0,7 kg

Material: Stålrör, Aluminium och PVC (handtag)

Användning:

1. Lossa clipset och justera handtaget till lämplig höjd och tryck sedan fast clipset igen.
2. Kontrollera att gåbockens ben är riktade ut från brukaren, om inte så justera handtaget genom att lossa clipset och vrid handtaget 180 grader.
3. Kontrollera doppskorna före användning. Slitna eller skadade doppskor ska bytas ut.

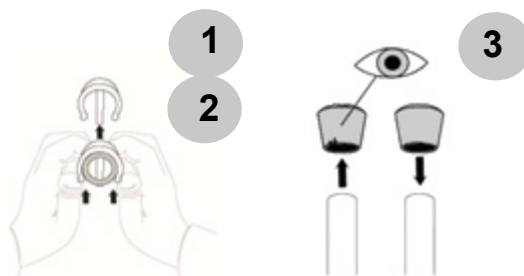

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare ska produkten desinficeras genom avtorkning med 70% isopropanol.

Reservdelar: Art. nr. 120710, Doppsko kvadrant, Art. nr. 14167106 Clips

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Visuell kontroll



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkare:

Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se