

## KRYCKKÄPP, PROFIL

Artikelnummer: **123890, 123900, 123910, 123920**

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.

**Avsedd användning:** Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

### Teknisk specifikation

Art. nr: <b>123890</b> höger	Art. nr: <b>123900</b> vänster	Art. nr: <b>123910</b> lång, höger	Art. nr: <b>123920</b> lång, vänster
Max brukarvikt: 140 kg Ställbar höjd: 77-99 cm Vikt: 0,67 kg	Max brukarvikt: 140 kg Ställbar höjd: 77-99 cm Vikt: 0,67 kg	Max brukarvikt: 120 kg Ställbar höjd: 92-114 cm Vikt: 0,73 kg	Max brukarvikt: 120 kg Ställbar höjd: 92-114 cm Vikt: 0,73 kg

Material: Aluminiumrör, PP (armbygel), trä (handtag), naturgummi (doppskor)

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:

**Swereco Rehab AB**

Barnhusgatan 4

SE-111 23 Stockholm

Tel: +46 8 444 38 20




Fax: +46 8 754 30 80

[www.swereco.se](http://www.swereco.se)

[info@swereco.se](mailto:info@swereco.se)

## Användning:

1. Justera höjden för kryckkäppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkäppen genast avbrytas.
3. Handtaget är roterbart. Justera handtaget genom att lossa på skruven med hjälp av en NV 6 insexnyckel. Vinkeln på handtaget skall anpassas efter den individuella brukaren.
4. Kontrollera skruven för handtaget regelbundet. Sitter skruven löst måste denna dras åt innan användning.
5. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

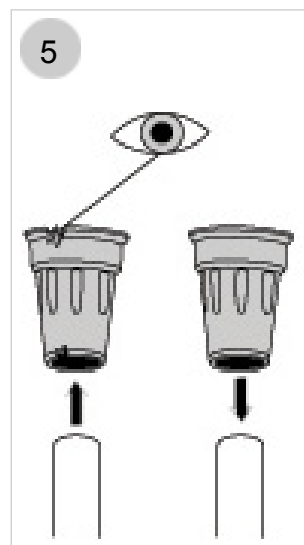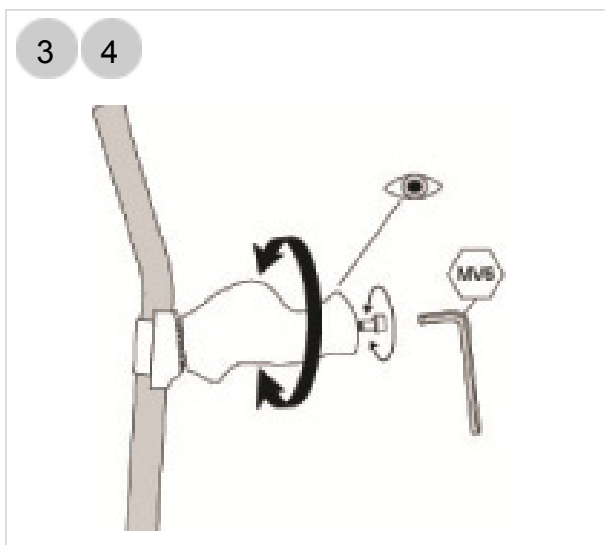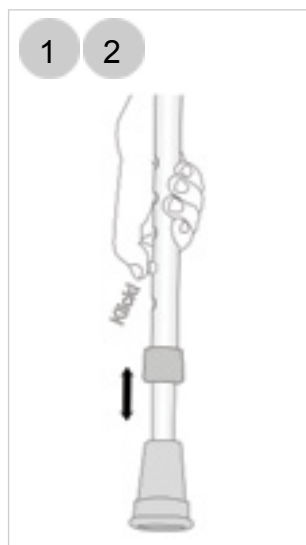

**Skötsel­anvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

## Reserv­delar:

- Art. nr 120750, Doppsko
- Art. nr 12389001, Profilhandtag, höger
- Art. nr 12389004, Insexskruv MC6Sx40
- Art. nr 12389007, Låsbricka Stål AZ21
- Art. nr 12389012, Täcklock
- Art. nr 12390001, Profilhandtag vänster

## Tillbehör:

- Art. nr 123300, Isdubb Spets
- Art. nr 123350, Isdubb Kronan
- Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar
- Art. nr 124885, Käpphållare Flex
- Art. nr 124889, Gummifot Stabil