

TOASITS FÖR BARN

Artikelnummer: 144900, 144905

Avsedd användning: Toasits för barn är avsedd att användas på toalett för att underlätta toalettbesök. Sitsen är portabel och ska fästas till toaletten med ett nylonband vid användning.

Leveranskontroll: Kontrollera att produkten är hel och att det medföljer ett nylonband. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Sitsen skall placeras direkt på porslinet, ta bort eller fäll upp lock och befintlig toalettsits.
- Toasitsen hålls fast i porslinet med hjälp av ett nylonband som spänns runt toalettstolen. Sitsen skall spännas fast för att inte riskera att tippa över om barnet lutar sig över armstödet.
- Kontrollera att sitsen sitter stadigt på toaletten innan användning.
- Lämna aldrig barnet obevakat på toalettsitsen!
- Max brukarvikt är 50 kg.

Montering:

1. Placera toasitsen direkt på porslinet på toaletten.
2. Spänn fast toalettsitsen i toaletten genom att dra spännbandet bakom ryggen och fäst spännet.
3. Kontrollera att sitsen sitter stadigt på toaletten innan användning.

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/vecka) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, torkas med 70% isopropanol. Sitsen skall avlägsnas från toaletten vid rengöring.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen



Max 50 kg

Max brukarvikt 50 kg.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



144900, hel sits

Teknisk specifikation

Art. Nr: **144900**

Art. Nr: **144905**
med urtag

Vikt: 5,4 kg

Vikt: 5,3 kg


Storlek sits:

Djup: 34 cm
Bredd: 45 cm

Hål sits:

Djup: 20 cm
Bredd: 17 cm

Material: Stålrör, lackerad spånskiva, ryggstöd i PUR.

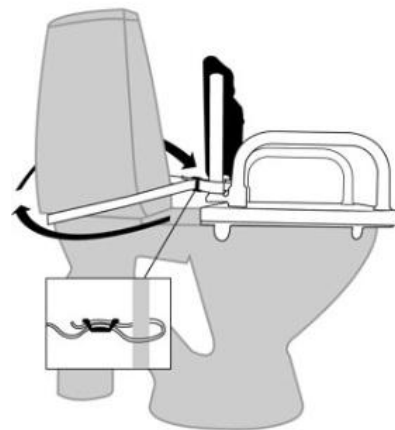

3144900

Tillverkad av:
Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se