

## DUSCHSTOL KULAN

Artikelnummer: 142113, 142114, 142116, 142117, 142118  
142137

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Stolen är ej avsedd för att brukas i badkar.
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter i den. Den maximala brukarvikten är beräknad med stolens fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stolen får snedställas max 2,5 cm (ett snäpp).
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp.
- Innan användning säkerställ att clipset för höjdjustering sitter ordentligt intryckt. Clipsets öppning ska vara riktade mot stolens insida.
- Vid byte av clips säkerställ att det är rätt modell (olika storlekar finns).
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 150 kg med hård rygg, 130 kg med mjuk rygg.



Art nr **142113** Duschstol Kulan, hel sits  
Art nr **142114** Duschstol Kulan, intimsits  
Art nr **142116** Duschstol Kulan, chassi  
Art nr **142117** Duschstol Kulan, hel sits,  
med hårt ryggstöd  
Art nr **142118** Duschstol Kulan, intimsits,  
med hårt ryggstöd  
art nr **142137** Duschstol Kulan, låg,  
hel sits, med hårt ryggstöd

**Avsedd användning:** Duschstol Kulan är avsedd att brukas som hjälpmedel vid duschning och tvagning för personer med nedsatt rörelsefunktion. Stolen är gjord för att brukas i våtutrymme.



Max säker brukarvikt  
150 kg / 130 kg med  
mjukrygg



Kan tvättas med alkalisk  
tvällösning, pH 5-9



Tvättas i max 85°C i max  
3 minuter



Visuell inspektion



Produkten följer EU  
direktiven 93/42/EEG och  
2007/47/EG för  
medicintekniska produkter




### Teknisk specifikation

Sits djup: 40 cm  
Sits bredd: 43 cm  
Bredd mellan armstöd: 52 cm  
Höjd armstöd från sits: 17 cm  
Vikt: 4,44 kg  
Höjd: 46-56 cm  
Höjd låg modell: 35-45 cm  
Material: Stålrör, PE (sits), TPE  
(stödfötter)

Tillverkad av:  
Vagnvägen 4  
SE-364 42 Lenhovda  
Tel: +46 (0)8 5000 5240  
www.swereco.com  
info@swereco.com

## Användning:

1. För justering av höjden. Tryck loss clipset från benet, justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igen. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Ersätts ett gammalt clips med nytt kontrollera att det är rätt storlek (finns i flera storlekar).
2. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut.
3. Ryggen ska skjutas på rören 6 cm, till stoppet. Var nog med att hålla ryggen vågrät.
4. Stolen får snedställas max 2,5 cm vilket motsvarar ett snäpp i höjdställningen.

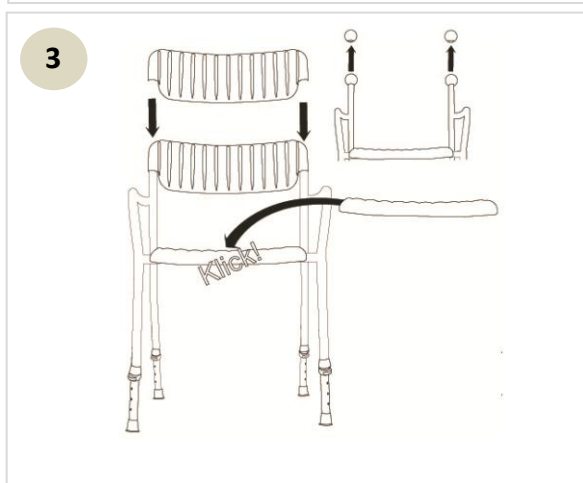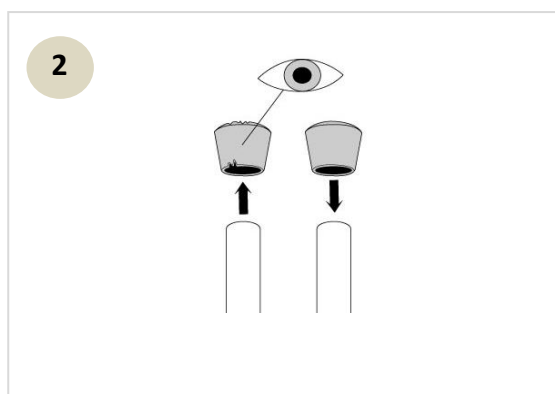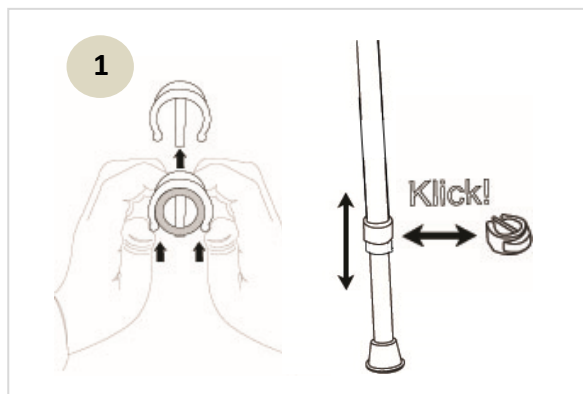

## Skötselanvisningar:

Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvålösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

## Tillbehör:

Art nr 142120 Ryggstöd  
 Art nr 142125 Mjukrygg  
 Art nr 142128 Sits  
 Art nr 142129 Sits intim

## Reservdelar:

Art nr 120690	Stödfot 18 mm
Art nr 120705	Kula/Handtag 22 mm
Art nr 14420213	Clips 25 mm
Art nr 142111305	Clipshållare
Art nr 14211320-S	Förlängarpåse 350 mm (4 ben inkl clips)
Art nr 14211313-S	Ben med ställbar fot