

MJUKSITS TILL KULAN

Artikelnummer: 142121, 142122

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Mjuksits till Kulan är framtagen för att passa Kulan serien, men Mjuksits passar **inte** på badkarsbräda Kulan.
- Innan användning försäkra att mjuksitsen är ordentligt nedtryckt i sitsen och sitter stabilt.
- Klarar alla brukarvikter upp till 150kg.

Avsedd användning: Mjuksits till Kulan används främst till brukare som behöver en mjukare eller varmare sits och även för att öka fästet mot stol/pall.

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max brukarvikt 150 kg

Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.

Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Storlek: 142121, 142122

Djup: 42 cm

Bredd: 45 cm

Tjocklek: 0,8 cm

Material: EVA Plast



3144210

Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tillverkad av:
Swereco AB
 Vagnvägen 4
 SE-364 42 Lenhovda
 Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com